

Stop-uri®


CONFORT

La pince pénienne des hommes incontinents

Le kit Stop-uri «confort» est constitué de 2 pinces, avec 5 paires de barrettes de réglage chacune. 2 paires de rechange de chaque taille sont également fournies en cas de perte.

Tailles des barrettes

L'utilisation des 5 tailles de barrettes permet de faire varier l'écartement entre les pinces.

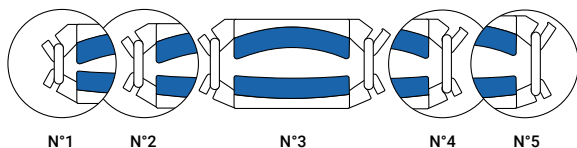


Conseils d'utilisation

- La pince doit être disposée juste en arrière du gland, non décalotté, pénis centré. L'urètre est ainsi comprimé.
- Le pénis et la pince doivent être propres et secs, exempts de toute trace d'urine.
- Légère, la pince Stop-uri peut être portée plusieurs heures de suite, la pression vésicale prévenant l'envie d'uriner. Néanmoins, il ne faut pas hésiter à uriner régulièrement afin d'éviter le remplissage excessif de la vessie.
- La mousse de serrage est une mousse à mémoire de forme. Il faut donc alterner le port des pinces un jour sur deux afin de leur permettre de retrouver du gonflant.

Irrigation du pénis

La largeur de la pince permet de ne pas altérer la circulation sanguine du pénis qui continue de s'effectuer par les côtés.

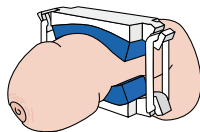

Utilisation de la pince

Il faut déterminer la bonne taille des barrettes de réglage pour comprimer l'urètre sans gêner et sans risquer d'entraver la circulation sanguine.


Plusieurs essais seront nécessaires sans oublier un temps d'adaptation au port de la pince. L'objectif est de ne pas ressentir de douleur, sachant qu'il est préférable d'avoir de légères pertes plutôt qu'une pince trop serrée. Portez une petite protection le temps de ces essais. Assurez-vous que la peau du pénis ne soit pas plissée ; ce peut être une source de gêne.

Il faut persévérer le temps de s'habituer à son port et être conscient que de légères pertes peuvent subsister. Cela dépend du degré de détérioration du système urinaire de chacun. Une surpression abdominale (comme soulever une charge lourde ou tousser) peut engendrer une perte momentanée incontrôlable.

Mise en place des barrettes

Une pince est fournie montée pour l'exemple. L'autre pince est à monter par vous-même, avec les barrettes à votre taille. Si cela vous convient, assembler les 2 pinces à l'identique.

La flèche en relief sur la pince courbe indique le côté à ouvrir pour uriner (cette pince courbe sera placée sur le haut du pénis pour une ouverture plus facile).

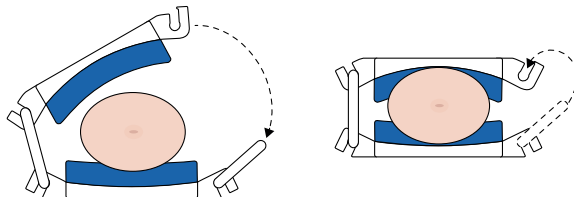

Important

En cas d'irritation de la peau, il est possible de placer une compresse entre la pince Stop-uri et la peau.

La nuit, du fait de la gravité, les pertes urinaires sont moindres ou inexistantes. Il est alors préférable de porter une protection. Néanmoins, si vous choisissez de garder Stop-uri, il est fortement conseillé d'utiliser des barrettes plus grandes que celles portées dans la journée et ce, si vous n'avez plus d'érections réflexes de nuit.

Astuces

Le maintien de la pince est plus aisé en portant des slips plutôt que des caleçons. Attention au passage de la position debout à la position assise (ou vice-versa) ; c'est à ce moment là que la pince peut glisser.

Les hommes en surpoids notable peuvent être gênés par le port de la pince qui risque de s'incruster dans la peau, notamment au niveau des cuisses. Il est alors conseillé de mettre un tissu intermédiaire.

Garantie

La pince Stop-uri est garantie 2 ans contre tous vices de fabrication (dans le cadre de son utilisation normale et préconisée), sauf la mousse. En cas de doute ou de problème contacter aussitôt votre médecin.

CE Dispositif médical de classe 1